

Nie mehr Batterien wechseln!

Die neuen Cellion-Hörgeräte: Leicht zu bedienen. Schnell wiederaufladbar.

Vereinfachen Sie Ihr Leben

Eine innovative Weiterentwicklung der Hörsysteme-Ladetechnologie: Cellion-Hörgeräte. Das sind extrem kleine Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte und sehr einfach in der Handhabung. Sie schalten sich in der Ladestation selbstständig ab und beim Herausnehmen wieder an. Die spezielle Lithium-Ionen-Akkutechnologie erzielt eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden. In nur vier



Stunden sind die Hörgeräte komplett geladen. Nach einem 30-minütigen Nachladen können sie bereits sieben Stunden lang genutzt werden. Da Cellion-Hörgeräte per Induktion geladen werden, benötigen sie weder Öffnungen für Ladkontakte noch ein Batteriefach. Somit sind sie auch hervorragend gegen Feuchtigkeit geschützt. Und für alle Fälle ist die Ladestation mit einer Trocknungsfunktion ausgestattet, die mit dem Aufladen automatisch startet.

Immer richtig verbunden

Für Cellion-Hörgeräte bieten wir Ihnen ein umfangreiches Zubehör-Sortiment. Mit diesen praktischen Helfern ermöglichen wir Ihnen noch mehr Komfort und Diskretion. So können Sie mit der touchControl-App* Ihre Cellion-Hörgeräte direkt über Ihr Smartphone steuern. Wenn Sie kein Smartphone nutzen wollen, verwenden Sie einfach die Miniaturfernbedienung miniPocket. Für eine diskrete und komfortable Bedienung.

Ausserdem können Sie Ihre Cellion-Hörgeräte auch mit dem Bluetooth-Verbindungsgerät easyTek und der easyTek-App* fernbedienen. Die easyTek empfängt den Ton von Fernsehern, Bluetooth-fähigen Telefonen, MP3-Playern sowie vielen anderen Geräten und sendet ihn direkt in Ihre Hörgeräte - auch den Klingelton Ihres Telefons. So verpassen Sie keinen Anruf mehr, auch wenn Sie beispielsweise gerade fernsehen.



* Kompatibel mit Android und iOS. Download kostenlos. Android und Google Play sind Handelsmarken von Google Inc. Apple App Store ist eine Handelsmarke von Apple Inc.



Sie wollen die neuesten Signia Hörgeräte kostenlos und unverbindlich zur Probe tragen? Dann melden Sie sich bis zum **xx.xx.2016** einfach bei uns:

Hörakustik Mustermann

Musterstrasse 6
1111 Musterhausen
Tel.: 000 000 00 00



Probetragen - so einfach geht's:

1. Vereinbaren Sie einen Termin bei **Max Mustermann**.
2. Machen Sie einen kostenlosen Hörtest.
3. Tragen Sie Hörgeräte kostenlos zur Probe

signia
Life sounds brilliant.

Hörsysteme

SIEMENS